

Phòng VTYT

1. Kiểm tra máy trước bảo dưỡng:

- Ghi lại vị trí bảo dưỡng hàng ngày của KTV như ng hút hút ng hay các đầu hút hút ng trong quá trình sử dụng.
- Kiểm tra cân trọng lượng của con mọt của người k hút .
- Bật máy cho hoạt động và đánh giá chất lượng.

2. Vệ sinh:

- Vệ sinh toàn máy.
- Vệ sinh, đầu vào của hệ thống áp lực van (APL, hoặc Pop-off)

3. Kiểm tra tổng quát :

- Kiểm tra bên ngoài của máy có hư hỏng gì không.
- Kiểm tra đầu vào khí y tế và xác định áp lực của đầu .
- Kiểm tra màu của đầu hút CO2
- Kiểm tra dây thở bên ngoài và phía trong .
- Kiểm tra chuyển động của núm đầu hút khí hút ng hút i.

4. Kiểm tra phần điện:

- Kiểm tra dây nguồn, dây nối và các đầu nối xem có bị hư hỏng gì không
- Kiểm tra các dây nối và cáp xem an toàn không.
- Kiểm tra điện áp nguồn.

5. Kiểm tra chức năng:

Quy trình bảo dưỡng máy gây mê kèm thở

Vị trí biên tập viên

Thứ ba, 29 Tháng 9 2020 16:45 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 29 Tháng 9 2020 20:36

- Kiểm tra nguồn và xác định không có gì bất thường.
- Kiểm tra tất cả các công tắc và núm vặn của hệ thống bình thường.
- Kiểm tra áp lực khí và O₂ có đủ không.
- Kiểm tra hoạt động của máy thở trong hệ thống máy gây mê.
- Kiểm tra màn hình hiển thị, các báo động của nồng độ O₂ và áp lực khí.
- Kiểm tra hệ thống bình và khí bình gây mê đảm bảo an toàn không.
- Kiểm tra bóng tay túi thở, đường thở và chức năng.

6. Kiểm tra vận hành:

- Cài đặt các thông số cho chế độ thở gây mê IPPV.
- Cài đặt các giới hạn báo động cho mode thở
- Kiểm tra máy bơm pha khí và xác định không có gì bất thường.

7. Bàn giao cho nhân viên sử dụng:

- Cho tiến hành chạy thử, đánh giá chất lượng máy so với trước và sau khi bảo dưỡng.
- Ghi lại các thông số kỹ thuật và quá trình bảo dưỡng vào sổ lưu.
- Bàn giao cho nhân viên sử dụng. Có xác nhận của người trực tiếp sử dụng hoặc trưởng phòng, phó khoa phòng.